



SILFLEX

Silflex es un apósito de contacto para heridas no adherente, fabricado con una malla de poliéster recubierta de silicona suave, hidrofóbica y atraumática, lo que lo hace ideal para pacientes con piel fina y frágil.

Silflex está diseñado para adherirse suavemente a la piel que rodea la herida sin pegarse al lecho de la herida, reduciendo así el dolor y el trauma asociados con el cambio de apósito.



SILTAPE

Siltape es una cinta de fijación de silicona suave, presentada en rollo con perforaciones para ser cortado fácilmente sin tijeras.

Siltape está fabricada con silicona, lo que la hace más suave al retirar en comparación con otros adhesivos que pueden causar daño tisular. Es especialmente útil en pacientes con piel muy fina y frágil.



ADVASIL CONFORM

Lámina de gel de silicona de grado médico y autoadhesiva, diseñada para el manejo del tejido cicatricial o heridas recientemente cerradas. Las láminas de gel de silicona ayudan a reducir los efectos de la cicatrización cuando se usan durante períodos prolongados. Advasil Conform se puede lavar y utilizar durante 28 días. Las cicatrices hipertróficas y queloides pueden beneficiarse especialmente del uso de Advasil Conform.



VELLAFILM

Vellafilm es un apósito estéril, transparente y atraumático de película de poliuretano con una suave capa adhesiva de silicona Silfix.

La silicona suave se adhiere a la piel seca, pero no a la herida húmeda. El vendaje es transparente y permite la observación de la zona de la herida o del vendaje primario, lo que minimiza la frecuencia del cambio de vendaje. La parte posterior de la lámina actúa como una barrera bacteriana y tiene un bajo coeficiente de fricción para reducir el posible daño tisular causado por fuerzas de corte.

iGrobe

ADVANCIS
GAMA SILICONAS

Apósitos de silicona blanda
en matriz de poliéster para el
cuidado de heridas.

ADVANCIS

APÓSITOS DE SILICONA CON TECNOLOGÍA SILFIX



Tecnología Silfix®

La capa de contacto de silicona Silfix® para heridas tiene múltiples poros pequeños de 2 mm que permiten el paso del exudado hacia la matriz de poliéster, a la vez que protegen el lecho de la herida. Esta combinación asegura que los apósitos se mantengan cómodamente en su lugar, minimizando el potencial de maceración.



Recubrimiento de silicona atraumático

Reduce el dolor durante la aplicación y los cambios de apósito.



No adherente

No se adhiere al lecho de la herida ni al apósito secundario.



Alta transferencia de exudado

Los grandes poros permiten el paso fácil del exudado hacia el apósito secundario.



Facilidad de uso

Fácil de manejar y no se adhiere sobre sí mismo.



Conformable

Suave y altamente conformable para una mayor comodidad del paciente¹.



Compatible con NPWT

Puede usarse junto con la Terapia de Presión Negativa para Heridas (NPWT)².

Estudios clínicos referenciados:

1. Developing a structured process for evaluating burn dressings. Edwards Jacky & Mason Sally Ann, Wythenshaw Hospital, Manchester
2. The use of a soft silicone wound contact dressing (Silflex) under topical negative pressure dressing. Rajpaul Kumal, Kings College Hospital, London

Producto	Referencia	Medidas	Presentación
SILFLEX	CR3922	5cm x 7cm	10
	CR3923	8cm x 10cm	10
	CR3924	12cm x 15cm	10
	CR3925	20cm x 30cm	10
	CR4006	35cm x 60cm	5

Indicaciones:

- Desgarros de piel
- Abrusiones de piel
- Heridas quirúrgicas
- Laceraciones
- Úlceras en piernas y por presión
- Presión negativa tópica (apósito primario)

Adecuado para heridas:



Producto	Referencia	Medidas	Presentación
SILTAPE	CR3938	2cm x 3m	12
	CR3939	4cm x 1.5m	12

Siltape puede utilizarse en cualquier situación en la que se usaría una cinta adhesiva convencional, especialmente cuando la piel es frágil o sensible.

Adecuado para heridas:



Indicaciones:

- Para fijar los párpados durante procedimientos quirúrgicos
- Para asegurar agujas de fístula, ya que puede ser recolocada
- Para proteger tejidos frágiles del daño por presión o heridas causadas por tubos; especialmente útil en el rostro y la parte superior de las orejas. Siltape puede aplicarse directamente sobre la piel y colocar el tubo encima
- Para el manejo de cicatrices

Producto	Referencia	Medidas	Presentación
ADVASIL CONFORM	CR3845	10cm x 10cm	5
	CR3832	10cm x 15cm	5

Para el manejo de cicatrices hipertróficas y queloides

Adecuado para heridas:



Producto	Referencia	Medidas	Presentación
VELLAFILM	CR3919	12cm x 12cm	10
	CR3921	15cm x 20cm	10
	CR3917	12cm x 35cm	10

Indicaciones:

- Heridas epitelizantes
- Heridas quirúrgicas
- Muy adecuado como protección de la piel, especialmente si es frágil.

Adecuado para heridas:



iGrobe

Innovación en el cuidado de piel y heridas

igrobe.com

Av. Cornellà 142, 4º 2º.
08950 Esplugues de Llobregat.
Barcelona.

Tel: +34 934 097 568

Fax: +34 934 097 569

Email: informacion@igrobe.com